

C-BLADE

Гутаперчевий ніж

Інструкція користувача



Цей бездротовий пристрій зі змінними нагрівальними кінчиками призначений для швидкого, точного і безпечного зрізання надлишкових гутаперчевих штифтів. Наконечник можна використовувати до 80 разів, не вставляючи його в зарядну станцію, і тому він завжди є легкодоступним для використання.

Стандартна конфігурація

Ручка (акумуляторна батарея Ni-MH)

Підставка для зарядки розетки

(версії 110 або 230 В)

4 нагрівальних кінчика



Технічні параметри

Розміри наконечника:

Довжина: 12,6 см (без ріжучого наконечника), Φ : 1,9 см

Напруга мережі: 230В/50Гц; 110В/60Гц

Призначення

Цей прилад призначений для гарячого видалення гутаперчевих штифтів.

Попередження

1. Цей пристрій слід використовувати із суворим дотриманням вказівок, зазначених в цій інструкції користувача. Виробник не несе жодної відповідальності за шкоду, заподіяну неправильним використанням.
2. При використанні зовнішнього джерела живлення переконайтеся, що напруга джерела живлення відповідає зазначеному діапазону напруги. Невідповідна напруга може пошкодити пристрій і може становити небезпеку для пацієнта та/або користувача.
3. З метою уникнення ризику травмування не слід допускати контакт наконечника з губами, яснами або слизовою оболонкою рота пацієнта. Рекомендовано використовувати кофердам.

4. Небезпека займання: не допускайте контакту нагрівального кінчика або ручки з горючими газами або рідинами.
5. Прилад не призначений для використання в середовищі, що містить легкозаймисті гази.
6. Не можна занурювати ручку і зарядну станцію в рідину.
7. Зверніть увагу, що нагрівальні кінчики, які підлягають заміні під час лікування, все ще можуть бути гарячими.
8. Якщо будь-яка рідина витікає з пристрою (можливо, з батареї), негайно припиніть роботу і відправте пристрій в авторизований Сервісний центр для заміни батареї. Небезпечно використовувати пристрій при протіканні батареї.
9. Небезпечно відкривати пристрій для заміни батареї. У випадку відкриття пристрою гарантія буде анульована.
10. Цей інструмент повинен використовуватись виключно стоматологами.

Застереження

1. Ніколи не згинайте нагрівальний кінчик, поки він все ще знаходиться в ручці.
2. Застосування надмірного зусилля під час лікування негативно позначиться на терміні служби нагрівальних кінчиків.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

Підготовка

1. Перед використанням слід перевірити, що напруга мережі збігається з напругою, зазначеною для приладу.

Заряджання

1. Перш за все, зарядіть прилад, підключивши зарядну станцію до розетки електромережі.
2. Вставте ручку у розетку зарядної станції. Поки прилад заряджається, на ручці горить індикатор.

Інструкція по застосуванню з нікель-метал-гідридною (Ni-MH) батареєю

Перед першим використанням приладу переконайтеся, що він повністю заряджений. Цей процес займає 12 годин. Завжди повністю розряджайте Ni-MH батарею перед її повною зарядкою. Це забезпечує оптимальний термін служби пристрою. Залежно від частоти використання термін служби приладу становить близько 2 років.

Уникайте заряджання акумулятора довше, ніж це необхідно для досягнення повної зарядки. Ніколи не заряджайте протягом більше 12 годин поспіль.

Використання

1. Встановіть нагрівальний кінчик у ручку. Переконайтеся, що кут вигину нагрівального кінчика спрямований в протилежний бік від кнопки управління. Це полегшує роботу.

Важливо: Ніколи не згинайте нагрівальний кінчик, поки він все ще знаходиться в ручці.

2. Введіть нагрівальний кінчик в ротову порожнину, поки він холодний (без натискання кнопки управління). Гутаперчевий штифт, який необхідно зрізати, має бути оточеним петлею нагрівального кінчика.

3. Як тільки нагрівальний кінчик буде розташований безпосередньо на вході в канал, натисніть кнопку управління.

4. Нагрівальний кінчик нагрівається за лічені секунди, і гутаперчевий штифт може бути швидко і чисто видалений.

5. Після відсікання штифту відпустіть кнопку управління. Нагрівальний кінчик негайно остигає і може бути видалений з ротової порожнини пацієнта. Кнопка управління являє собою контактну поверхню котра перемикає програми: при її відпусканні прилад вимикається.

6. Зніміть нагрівальний кінчик з ручки після використання.

Важливо: Будь ласка, не натискайте на кнопку протягом більше 30 секунд.

Очищення та стерилізація

Перед використанням у кожного пацієнта нагрівальні кінчики слід очистити та простерилізувати.

Будь-які залишки гутаперчі, які все ще залишаються на інструменті, можна видалити, обережно протерши його об кульку вати.

При правильному використанні нагрівальні кінчики можна автоклавувати не більше 25 разів. Час стерилізації залежить від температури стерилізації (при 121°C, не менше 20 хвилин; при 132°C/134°C не менше 5 хвилин).

Усунення несправностей

Якщо нагрівальний кінчик не нагрівається відразу після натискання кнопки управління, перевірте електричні контакти на нагрівальному кінчику. Якщо вони несправні, замініть нагрівальний кінчик на новий. Якщо індикатор на наконечнику не загоряється під час зарядки, перевірте, чи підключена зарядна станція до мережі або перевірте саме джерело живлення.

Тлумачення символів

Символ	Визначення символу	Символ	Визначення символу
	Виробник		Обладнання класу II
	Дата виготовлення		Користуватися інструкцією щодо користування
	Користуйтеся інструкцією із застосування		Засторога!
	Уповноважений представник в Європейському Союзі		Серійний номер
	СЕ маркування знак відповідності Директивам ЕС		Роздільне збирання електричного та електронного обладнання
	Знак відповідності технічним регламентам		Крихке, бути обережним
	Вверх		Зберігати в сухому місці, обережати від дощу
	Використовується лише в приміщенні		Робоча частина типу B

 **Foshan COXO Medical Instrument Co., Limited** BLDG 4 District A, Guangdong New Light Source Industrial Base, South of Luocun Avenue, Nanhai District, Foshan 528226 Guangdong China / **ФОШАНЬ КОКСО МЕДІКАЛ ІНСТРУМЕНТ КО., ЛІМІТІД** Будівля 4, район Ей, Гуандун Нью Лайт Сорс Індастріел Бейс, Сауф оф Лукан Авенью, район Наньхай, місто Фошань, 528226 Гуандун, Китай.

Уповноважений представник в Україні: ТОВ «ОЛЛЕН-ДЕНТАЛ»

04119, Україна, м. Київ, вул. Юрія Ілленка, 83 Д оф. 117, тел.: +380934477575, e-mail: dir_ollen@ukr.net.

Дата перегляду інструкції: 01.06.2021.