

**Основні матеріали:**

- 1 - Матеріал робочої частини – неіржавна сталь або нікель-титановий сплав.
- 2 - Матеріал руків'я – сплав алюмінію.

Комплектація

Один або два плагери в пакованні.

Розміри : 40/80 чорний, 50/100 золотистий.

Призначення

Для ущільнення гутаперчі під час методики безперервної хвилі або іншої методики обтурації гутаперчею.

Застосування

Застосовуються для обтурації кореневого каналу.

Протипокази

Не використовуйте для пацієнтів, що мають підвищену чутливість або алергічну реакцію на компоненти плагерів.

Застереження

Для використання виключно стоматологами.

Спосіб застосування та протокол роботи

Перед введенням гутаперчі потрібно підібрати необхідний розмір плагера, що має стопоритися на межі апікальної й середньої та середньої й устьової третини кореневого каналу. Після введення в канал розігрітої гутаперчі обраний розмір плагера використовується для ущільнення гутаперчі й компенсації зменшення в об'ємі під час охолодження.

Повторне використання

Переконайтесь, що інструменти не мають деформацій, подряпин та тріщин. Ретельно очистьте та вимийте від сторонніх речовин і стерилізуйте. Дотримуйтесь інструкцій виробника мийного засобу.

Стерилізація

Цей продукт є нестерильним і повинен піддаватися обов'язковій стерилізації перед використанням. Виробник рекомендує холодну стерилізацію інструментів, оскільки термічне оброблення ні-ті сплаву може призвести до зміни якості виробу.

Якщо ви обираєте парову стерилізацію, вона має відповідати національним протоколам та стандартам.

Умови зберігання

Зберігати стерилізовані інструменти в сухому чистому середовищі без пилу за помірної температури в діапазоні від 5 °C до 40 °C.

Утилізація

Помістіть використані плагери в контейнер для біологічно небезпечних відходів.

Строк придатності : 5 років.

Гарантія

Компанія відповідає за якість продукції та технічне обслуговування. Якщо виникнуть будь-які проблеми з роботою обладнання, технічний відділ надасть вам необхідну підтримку.

Гарантія дійсна за відповідних умов використання плагера. У разі механічного пошкодження гарантія вважатиметься недійсною.

Тлумачення символів



Користуйтеся інструкцією по застосуванню



Знак відповідності технічним регламентам



Дата виготовлення



Термін використання



Виробник



Код партії

Дата перегляду інструкції: 07-09-2022



Foshan COXO Medical Instrument Co., Limited BLDG 4 District A,
Guangdong New Light Source Industrial Base, South of Luocun Avenue,
Nanhai District, Foshan 528226 Guangdong China / **ФОШАНЬ КОКСО МЕДІКЛ
ІНСТРУМЕНТ КО., ЛІМІТІД** Будівля 4, район Ей, Гуандун Нью Лайт Сорс
Індастріел Бейс, Сауф оф Лукан Авенью, район Наньхай, місто Фошань,
528226 Гуандун, Китай.

Уповноважений представник в Україні: ТОВ «ОЛЛЕН-ДЕНТАЛ»

04119, Україна, м. Київ, вул. Юрія Ілленка, 83 Д оф.117, тел.: +380934477575,
e-mail: dir_ollen@ukr.net.