

Інструкція із застосування

Профілактичний порошок, бікарбонат натрію, класичний 130, 260 г (г) / пляшка, смак лимону

ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ

Використовують у порожнині рота для шліфування й полірування тканин зубів або протезів, щоб зробити їхню поверхню гладенькою та однорідною, а також для видалення зубного нальоту (зубного каменю). Цей виріб використовують з пристроєм для видалення нальоту й повітряного полірування. Виріб не є стерильним і не може бути використаний повторно.

ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ: білий порошок.

СТРУКТУРА ТА СКЛАД

До складу виробу входять бікарбонат натрію, діоксид кремнію, харчова ароматизувальна есенція (лимонна ароматична есенція: цитраль, персикова ароматична есенція: γ -унсекалктон (персиковий альдегід), фруктові ароматична есенція: ванілін, етилванілін, виноградна ароматична есенція: метилантранілат, вишнева ароматична есенція: бензальдегід, амібутірат, бензиловий спирт, анісовий альдегід, есенція зі смаком полуниці: олія давани, етил-3-метил-3-фенілгліцидат).

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ Й ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

1. Умови зберігання: температура: від -10°C до 40°C , відносна вологість: від 10% до 95%, герметичне зберігання.
2. Будь ласка, транспортуйте цей виріб в умовах навколишнього середовища за температури від -10°C до 40°C і відносної вологості від 10% до 95%.
3. Термін придатності: у разі дотримання зазначених умов зберігання термін придатності становить 24 місяці.
4. Термін придатності після відкриття пляшки: якщо пляшку почато, необхідно щоразу після користування щільно закривати кришку; термін придатності після відкриття пляшки й із дотриманням зазначених умов зберігання становить 3 місяці.

ІНСТРУКЦІЯ

Завантажте профілактичний порошок у порошкову камеру пристрою для видалення нальоту й повітряного полірування та дійте згідно з інструкцією із застосування цього виробу.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

1. Не зберігати профілактичний порошок поблизу кислих розчинів або джерел тепла та не піддавати безпосередньому впливу повітря. У разі злежування, знебарвлення й інших аномальних проявів використання виробу варто припинити.
2. Користувачі та пацієнти повинні використовувати засоби захисту очей, а також рукавички й маску.
3. Перед початком лікування нанесіть вазелін (Vaseline®) на губи пацієнта.
4. У разі потрапляння профілактичного порошку в очі під час лікування їх треба промити великою кількістю води. Не можна ковтати порошок під час лікування.
5. Будь ласка, використовуйте високошвидкісний евакуатор вашого стоматологічного кабінету.
6. Профілактичний порошок слід утилізувати та знищувати відповідно до місцевих правил після закінчення терміну його придатності; не можна викидати порошок у дренажні стоки або річки чи змішувати з побутовим сміттям.
7. За винятком осіб, які мають протипоказання, виріб підходить для дорослих і дітей, що потребують лікування порожнини рота.
8. Цей виріб призначений тільки для використання в порожнині рота та не може бути використаний повторно або перорально. Не використовувати після закінчення терміну придатності.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

1. Пацієнти, які страждають від інфекцій верхніх дихальних шляхів, хронічного бронхіту або астми, за жодних обставин не повинні отримувати лікування за допомогою пристрою для повітряного полірування. Струмін повітря й порошок може викликати утруднення дихання.
2. Схильні до алергічних реакцій люди можуть бути чутливими до порошку. Якщо з'явилися симптоми алергічних реакцій, припиніть використання виробу й повністю видаліть порошок із рота.
3. Лікування глибоких пародонтальних кишень може викликати бактеріємію. Для пацієнтів із групи ризику (пацієнти з ендокардитом; вагітні жінки; жінки, які годують груддю; хворі на контактні інфекційні захворювання); осіб, які страждають на імунodefіцит (пацієнти з нейтропенією, гранулоцитопенією, цукровим діабетом, гемофілією); і для пацієнтів, котрі проходять лікування (променева терапія, хіміотерапія, лікування антибіотиками), будь ласка, застосовуйте відповідні обмеження.
4. Не спрямовуйте струмін порошку на пломби, коронки або мостоподібні протези, оскільки це може їх пошкодити.
5. Для пацієнтів із важкими захворюваннями пародонту рекомендується перед процедурою повітряного полірування спершу мінімізувати запалення.

ЗАСТОСОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ

Підходить для пристроїв із видалення нальоту й повітряного полірування. Рекомендовано використовувати пристрої, вироблені компанією **Guilin Veirun Medical Technology Co., Ltd.**

ТЛУМАЧЕННЯ СИМВОЛІВ

 Логотип виробника	 Виробник	 Дата виготовлення	 Використати до
 Добре струсіть перед використанням	 Користуйтеся інструкцією із застосування	 Крихке, поводитися обережно	 Знак відповідності технічним регламентам
 Обмеження температури	 Обмеження вологості	 Зберігати в сухому місці	 Знак відповідності Європейській Директиві
 Захищати від сонячного світла	 Код партії	 UDI (унікальний ідентифікатор виробу)	 Медичний виріб
 Цією стороною вгору	 Уповноважений представник в Європейському Співтоваристві	 Штабелювання обмежене: межа за кількістю ярусів в штабелі: (5 – максимальна кількість однакових одиниць вантажу, які можна укладати один на одного штабелем)	



Guilin Veirun Medical Technology Co., Ltd., No. D-07 Information Industry District, High-Tech Zone, 541004 Guilin, Guangxi, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA / **Гуйлінь Вейрунь Медікал Текнолоджі Ко., Лтд.**, № Д-07 Інформейшн Індастрі Дістрікт, Хай-Тек Зоун, 541004 Гуйлінь, Гуансі, КИТАЙСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА

Тел.: +86(773)5880619

Факс: +86(773)2260519

Вебсайт: www.veirun.com

E-mail: info@veirun.com

Уповноважений представник в Україні: ТОВ «ОЛЛЕН-ДЕНТАЛ»

04119, Україна, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 83 Д оф. 117, тел.: +380934477575,

e-mail: dir_ollen@ukr.net

Дата останнього перегляду інструкції: 15.08.2024