

35.0 mm

31.7 mm

Інструкція із застосування

2. Моделі виробів

30Cr13	G3, G4, G5, G6,
40Cr	G7, G8, G9, G10,
50Cr	G11, G12, G13, G14,
60Cr	G15, G16, G17, G18,
70Cr	G19, G20, G21, G22,
80Cr	G23, G24, G25, G26,
90Cr	G27, G28, G29, G30,
100Cr	G31, G32, G33, G34,
110Cr	G35, G36, G37, G38,
120Cr	G39, G40, G41, G42,
130Cr	G43, G44, G45, G46,
140Cr	G47, G48, G49, G50,
150Cr	G51, G52, G53, G54,
160Cr	G55, G56, G57, G58,
170Cr	G59, G60, G61, G62,
180Cr	G63, G64, G65, G66,
190Cr	G67, G68, G69, G70,
200Cr	G71, G72, G73, G74,
210Cr	G75, G76, G77, G78,
220Cr	G79, G80, G81, G82,
230Cr	G83, G84, G85, G86,
240Cr	G87, G88, G89, G90,
250Cr	G91, G92, G93, G94,
260Cr	G95, G96, G97, G98,
270Cr	G99, G100, G101, G102,
280Cr	G103, G104, G105, G106,
290Cr	G107, G108, G109, G110,
300Cr	G111, G112, G113, G114,
310Cr	G115, G116, G117, G118,
320Cr	G119, G120, G121, G122,
330Cr	G123, G124, G125, G126,
340Cr	G127, G128, G129, G130,
350Cr	G131, G132, G133, G134,
360Cr	G135, G136, G137, G138,
370Cr	G139, G140, G141, G142,
380Cr	G143, G144, G145, G146,
390Cr	G147, G148, G149, G150,
400Cr	G151, G152, G153, G154,
410Cr	G155, G156, G157, G158,
420Cr	G159, G160, G161, G162,
430Cr	G163, G164, G165, G166,
440Cr	G167, G168, G169, G170,
450Cr	G171, G172, G173, G174,
460Cr	G175, G176, G177, G178,
470Cr	G179, G180, G181, G182,
480Cr	G183, G184, G185, G186,
490Cr	G187, G188, G189, G190,
500Cr	G191, G192, G193, G194,
510Cr	G195, G196, G197, G198,
520Cr	G199, G200, G201, G202,
530Cr	G203, G204, G205, G206,
540Cr	G207, G208, G209, G210,
550Cr	G211, G212, G213, G214,
560Cr	G215, G216, G217, G218,
570Cr	G219, G220, G221, G222,
580Cr	G223, G224, G225, G226,
590Cr	G227, G228, G229, G230,
600Cr	G231, G232, G233, G234,
610Cr	G235, G236, G237, G238,
620Cr	G239, G240, G241, G242,
630Cr	G243, G244, G245, G246,
640Cr	G247, G248, G249, G250,
650Cr	G251, G252, G253, G254,
660Cr	G255, G256, G257, G258,
670Cr	G259, G260, G261, G262,
680Cr	G263, G264, G265, G266,
690Cr	G267, G268, G269, G270,
700Cr	G271, G272, G273, G274,
710Cr	G275, G276, G277, G278,
720Cr	G279, G280, G281, G282,
730Cr	G283, G284, G285, G286,
740Cr	G287, G288, G289, G290,
750Cr	G291, G292, G293, G294,
760Cr	G295, G296, G297, G298,
770Cr	G299, G300, G301, G302,
780Cr	G303, G304, G305, G306,
790Cr	G307, G308, G309, G310,
800Cr	G311, G312, G313, G314,
810Cr	G315, G316, G317, G318,
820Cr	G319, G320, G321, G322,
830Cr	G323, G324, G325, G326,
840Cr	G327, G328, G329, G330,
850Cr	G331, G332, G333, G334,
860Cr	G335, G336, G337, G338,
870Cr	G339, G340, G341, G342,
880Cr	G343, G344, G345, G346,
890Cr	G347, G348, G349, G350,
900Cr	G351, G352, G353, G354,
910Cr	G355, G356, G357, G358,
920Cr	G359, G360, G361, G362,
930Cr	G363, G364, G365, G366,
940Cr	G367, G368, G369, G370,
950Cr	G371, G372, G373, G374,
960Cr	G375, G376, G377, G378,
970Cr	G379, G380, G381, G382,
980Cr	G383, G384, G385, G386,
990Cr	G387, G388, G389, G390,
1000Cr	G391, G392, G393, G394,
1010Cr	G395, G396, G397, G398,
1020Cr	G399, G400, G401, G402,
1030Cr	G403, G404, G405, G406,
1040Cr	G407, G408, G409, G410,
1050Cr	

[illegible]

Виготовлений із високоякісної нержавіючої сталі, з'єднується з ручною різьбою М

4. Сфера застосування
Комбінується з ультразвуковим скапюром і використовується для очищення або надання форми поверхні зубів і коронкового каналу.

Твердість поверхні насадки з титанового
з наїржаної сталі: HRC20 – HRC51(крім

Якщо насадку повинні працювати у водному середовищі, то за умови тиску води в угіддрасуно-
вомому скелері в діапазоні 0,01 МПа (МПа) – 0,5 МПа (МПа) максимальна витрата води насадкою
становить 10 м³/мін (м³/хв) – 100 м³/мін (м³/хв). Якщо насадку працює у безводному середовищі,

6.1 Застосування виробу для лікування :
6.2 Застосування виробу для лікування :

6.5 Застосування вірогелів з кардіостимуляторами заборонено.

Специфікація різьби для насадок із профілюються у тому, що затискач гайкою.

МЗ*0,6. У разі використання на ручці з іншою специфікацією різьби нагайкуватися не буде. Прямусове загвинчування може пошкодити ручку й різьбу насадки. Підтримі для утримування цих скалярів SATELEC, DTE і NSK. Специфікація різьби для насадок без префікса S (наприклад

[illegible]

7.8. Інформація та локалізація верстатів при обслуговуванні відповідно до місцевих правил.

7.9. Рекомендації щодо використання галузевої прокладури для захисту під час чистки зубів.

7.10. Оператори повинні пройти відповідну професійну підготовку.

В. Звернення

Умова зберігання: зберігати в чистому, сухому та провітрюваному приміщенні, відносна вологість: 10% – 93%, атмосферний тиск: 70 кПа (кПа) – 106 кПа (кПа), температура: -20°C до 55°C.

Величезні насадки, промийте часто водою, поки не зникнуть видимі забруднення, потім протріть повільно 75% медичним спиртом і продезинфікуйте в паровому стерилізаторі під тиском. Температура дезинфекції: 134°C, атмосферний тиск: 2,0 бар (бар) – 2,3 бар (бар). Тривалість впливу: 15 хвилин.

10. **Технічне обслуговування**
Після використання насадки слід очистити й продезинфікувати, потім висушити та зберігати для подальшого використання.

 Емкостатити /

	Використати до		Застосувати як інструмент до застосування
	Код партії		Дата виготовлення
	Застерега, попередження		Знак відповідності технічним регламентам
	Логотип виробника		Знак відповідності Європейській Директиві
	Уповноважений представник в Європейському Союзі		Виробник
	Модельний вибір		Уповноважений представник в Україні за умови наявності відповідного розпорядження (Директива 2002/95/ЄС)
	Застосувати до інструменту до застосування		

12. Гарантія

13. Cepaic

Виробник знімає з себе відповідальність за безпеку виробу й оголошує гарантію надійності, якщо сервіс чи ремонт виконується неавторизованою третьою стороною або якщо використовується

■ Gullie Veiras Medical Technology Co., L.M. No. D-07 Information Industry District, High-Tech

Zone, 541004 Gulin, Guangri, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA / Гу́линь, Вэйрунь, Мэрикан
Техноло́джи Ко., Лтд., № Д-07 Информейкан Ыдастры Дистри́кт, Хай-Тек Зуун, 541004 Гу́линь, Гуанси
ЖУНХУАЙСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА

☎: +86(773)5880619
☎: +86(773)2260519
Web: www.vetrun.com
E-mail: info@vetrun.com

Уповноважений представник в Україні: ТОВ «ОЛІЕН-ДЕНТАЛ»
04119, Україна, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 83 Д оф. 117, тел.: +380934477575,
e-mail: dir_olientukr.net.

Дата останнього перегляду інструкції: 15.08.2024