


Інструкція із застосування НіТі файлів з пам'яттю форми SC та файлів з пам'яттю форми SC PRO SOCO



UA.TR.099

Основні матеріали

- 1) Ріжуча робоча частина – спеціальний сплав нікель титану з пам'яттю форми;
- 2) Хвостовик – мідний сплав.
- 3) Обмежувальний блок, як правило, виготовляють з гуми.

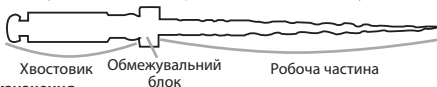

Призначення

Лікування пульпітів і періодонтитів тимчасових і постійних зубів.

Застосування

Застосовуються для видалення дентину, предентину і рештків пульпи з корневих каналів і їх формування, шляхом постійних обертових рухів всередині кореневого каналу.

Протипокази

Не використовуйте для пацієнтів, що мають чутливість або алергічну реакцію на компоненти файлів.

Засторога!

Для використання виключно стоматологам.

Комплектація

НіТі файли з пам'яттю форми SC – 6 файлів. Довжина: 21, 25, 28 та 31 mm (mm). Розміри: мікс (17/08, 15/03, 20/04, 25/04, 30/04, 35/04), 25/02, 45/02, 50/02, 60/02, 70/02, 15/03, 10/04, 15/04, 20/04, 25/04, 30/04, 35/04, 40/04, 45/04, 50/04, 55/04, 18/05, 15/06, 20/06, 25/06, 30/06, 17/08, 30/08.

Довжина: 16 mm (mm) та 19 mm (mm). Розміри: 17/08, 30/08.

Файли з пам'яттю форми SC PRO – 6 файлів. Довжина: 21, 25, 28 та 31 mm (mm). Розміри: мікс (17/08, 19/02, 20/04, 25/04, 35/04, 25/06), 17/08, 19/02, 25/02, 45/02, 50/02, 10/04, 15/04, 20/04, 25/04, 30/04, 35/04, 40/04, 45/04, 50/04, 18/05, 15/06, 20/06, 25/06, 30/06.

Довжина: 16 mm (mm), 19 mm (mm). Розмір: 17/08.

Спосіб роботи та протокол

1 – Рентгенографічна оцінка і ізоляція.

2 – Видалення карієсу, пломб, що потребують заміни, формування доступу.

3 – Формування коврової доріжки:

3.1 Створіть коврову доріжку ручними сталевими інструментами типу К файл 006, 008, 010, 015 (в залежності від ширини корневих каналів);

3.2 Визначте робочу довжину за допомогою апекс локатору;

3.3 Проведіть іригацію корневих каналів. Не забувайте після кожного файлу ретельно промивати канал;

3.4 Як тільки К файл 15 розміру вільно рухається на робочій довжині з амплітудою 3-4 mm (mm) можна використовувати пасфайл 15/03 чи 19/02. Файл використовується ключовими рухами вглиб-назовні до досягнення робочої довжини. Рекомендована швидкість 350-450, номінальний крутний момент 1.5.

3.5 Наступний файл – устьовий (17/08), глибина введення ключовими рухами - 3-4 mm (mm), на швидкості 350-450, номінальний крутний момент - 3.0.

3.6 Всі наступні файли використовуються послідовно по збільшенню розміру. Для безпечної роботи, файл кожного нового розміру використовується 4-6 ключовими рухами вглиб-назовні до досягнення робочої довжини. Рекомендована швидкість 350-450, номінальний крутний момент 1.5.

3.7 Файли з пам'яттю форми SC PRO мають файл розміру 25/06. При необхідності використовуйте розмір 25/06 для розширення двох третин кореневого каналу. Працювати файлом 25/06 на всю робочу довжину не рекомендовано.

ВВ: Рекомендації для безпечного проходження кореневого каналу:

- Під час інструментальної обробки регулярно промивайте кореневий канал іригаційним розчином, для попередження блокування кореневого каналу рештками дентину;
- Не намагайтесь форсувати файл вглиб кореневого каналу!
- Після використання кожного інструменту рекомендовано повторно проходити кореневий канал ручним файлом з діаметром 10-15, для перевірки прохідності кореневого каналу.
- Стежте за інструментом! Уникайте розкручування, появи дефектів на робочих гранях інструменту, бо це може призвести до поломки інструменту всередині кореневого каналу.
- Устові файли всіх наборів використовуються з крутним моментом 3.0 N·m (Н·м). Всі інші файли використовуються з крутним моментом 1.5 N·m (Н·м).

Повторне використання

Переконайтесь, що інструменти не мають повторної деформацій, подряпин та тріщин. Ретельно очистіть та вимийте від сторонніх речовин та стерилізуйте. Дотримуйтесь інструкцій виробника м'якого засобу.

Стерилізація

Цей виріб є нестерильним і підлягає обов'язковій стерилізації перед використанням. Парова стерилізація інструментів із дотриманням відповідних нормативних вимог на національному рівні:

- 3 фази форвакууму
- Нагріти до температури стерилізації 134°C
- Найменший час витримки: 15 min (хв). Час висушування: щонайменше 20 min (хв).

Умови зберігання: Зберігати стерилізовані інструменти в сухому чистому оточенні без пилу при помірній температурі в діапазоні від 5°C до 40°C.

Строк придатності: 5 років.

Утилізація

Помістіть використані файли в контейнер для біологічно небезпечних відходів.

Тлумачення символів



Виробник



Дата виготовлення



Код партії



Використати до



UA.TR.099

Знак відповідності
технічним регламентам



Не стерильно



Користуйтеся інструкцією
із застосування



Нікель титан



375RPM

Рекомендована швидкість роботи
(обертів в хвилину)



Засторога, попередження



Можна стерилізувати в паровому
стерилізаторі за температури 134°C



FOSHAN SOCO PRECISION INSTRUMENT CO., LTD., 3-5 FL. Bldg 4, District A and 5 FL. Bldg 3, District A, Guangdong New Light Source Industrial Base, Luocun, Shishan Town, Nanhai District, Foshan City, 528226, Guangdong, P.R. China / **ФОШАНЬ СОКО ПРЕСІЖНІНСТРУМЕНТ КО., Лтд.**, 3-5 Поверх, Будівля 4, район Ей та 5 Поверх, Будівля 3, район Ей, Гуандун Нью Лайт Сорс Індастріел Бейс, Лукан, Шишан таун, район Нанхай, місто Фошань, 528226, Гуандун, Китайська Народна Республіка, тел.: +86-757-81806001, e-mail: sale6@socodent.com

Уповноважений представник в Україні: ТОВ «ОЛЛЕН-ДЕНТАЛ»

04119, Україна, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 83 Д, оф. 117, тел.: +380934477575, e-mail: dir_ollen@ukr.net

Дата останнього перегляду інструкції: 07.10.2024.