

Інструкція із застосування HiTi файлів SC Plus, файлів з пам'яттю форми SC PRO 2018, HiTi файлів SC Plus Lite, файлів з пам'яттю форми SC PRO 2018 LITE SOCO

Основні матеріали


- 1) Ріжуча робоча частина – спеціальний сплав нікель титану з пам'яттю форми;
- 2) Хвостовик – мідний сплав;
- 3) Обмежувальний блок, як правило, виготовляють з гуми.

Комплектація: від 4 до 6 файлів в упаковці. Довжина: 21, 25, 31 mm (мм) розміри: мікс, 12/VT, 16/VT, 19/02, 25/02, 45/02, 50/02, 10/04, 15/04, 20/04, 25/04, 30/04, 35/04, 40/04, 45/04, 50/04, 18/05, 15/06, 20/06, 25/06, 30/06. Довжина 16 mm (мм), 19 mm (мм) розмір: 17/12.

Призначення: лікування пульпітів і періодонтитів тимчасових і постійних зубів.

Застосування: для видалення дентину, предентину і рештків пульпи з корневих каналів і їх формування, шляхом постійних обертових рухів всередині кореневого каналу.

Протипокази: не використовуйте для пацієнтів, що мають чутливість або алергічну реакцію на компоненти файлів.

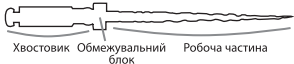

UA.TR.099

Засторога! Для використання виключно стоматологам.

Спосіб роботи та протокол: 1 – Рентгенографічна оцінка і ізоляція. 2 – Видалення карієсу, пломб що потребують заміни, формування доступу до гирл корневих каналів. 3 – Формування коврової доріжки: 3.1 створіть коврову доріжку ручними стальними інструментами типу К файли 006, 008, 010, 015 (в залежності від розміру корневих каналів); 3.2 визначте робочу довжину за допомогою апекс локатору; 3.3 проведіть іригацію корневих каналів. Після кожного файлу ретельно промивайте канал. 3.4 якщо К файл 10 розміру вільно рухається на робочій довжині з амплітудою 3-4 mm (мм) можна використовувати ротаційні файли. При складній анатомії застосуйте файли розміру 12/VT та 16/VT. Працюйте ключовими рухами вглиб-назовні до досягнення робочої довжини. Рекомендована швидкість 300-400, крутний момент 1.5. 3.5 Перевірте робочу довжину. Наступний файл – устьовий 17/12, глибина введення ключовими рухами – 3-4 mm (мм), на швидкості 300-400, крутний момент 3.0. Всі наступні файли використовуйте послідовно по збільшенню розміра на всю робочу довжину. Працюйте 4 – 6 ключовими рухами вглиб-назовні до досягнення робочої довжини. Рекомендована швидкість 300-400, крутний момент 1.5.

Стерилізація: ці вироби є нестерильними і підлягають обов'язковій стерилізації перед використанням. Парова стерилізація інструментів із дотриманням відповідних нормативних вимог на національному рівні: • 3 фази форвакууму; • Нагріти до температури стерилізації 134°C; • Найменший час витримки: 15 min (хв). Час висушування: щонайменше 20 min (хв).

Умови зберігання: зберігати стерилізовані інструменти в сухому чистому оточенні без пилу при помірній температурі в діапазоні від 5°C до 40°C.

Утилізація: помістити використані файли в контейнер для біологічно небезпечних відходів.

Тлумачення символів



Виробник



Дата виготовлення



Код партії



Використати до



Нікель титан



Користуйтеся інструкцією
із застосування



Знак відповідності
технічним регламентам

UA, TR, 009



Можна стерилізувати в
паровому стерилізаторі
за температури 134°C



Знак відповідності
Європейській Директиві



350RPM

Рекомендована
швидкість роботи



Засторога,
попередження



Уповноважений представник
в Європейському
Співтоваристві



FOSHAN SOCO PRECISION INSTRUMENT CO., LTD., 3-5 FL. Bldg 4, District A and 5 FL. Bldg 3, District A, Guangdong New Light Source Industrial Base, Luocun, Shishan Town, Nanhai District, Foshan City, 528226, Guangdong, P.R. China / **ФОШАНЬ СОКО ПРЕСІЖН**

ІНСТРУМЕНТ КО., Лтд., 3-5 Поверх, Будівля 4, район Ей та 5 Поверх, Будівля 3, район Ей, Гуандун Нью Лайт Сорс Індастріел Бейс, Лукан, Шишан таун, район Наньхай, місто Фошань, 528226, Гуандун, Китайська Народна Республіка, тел.: +86-757-81806001, e-mail: sale6@socodent.com

Уповноважений представник в Україні: ТОВ «ОЛЛЕН-ДЕНТАЛ»

04119, Україна, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 83 Д, оф. 117, тел.: +380934477575, e-mail: dir_ollen@ukr.net

Дата останнього перегляду інструкції: 07.10.2024.